

益普舒® 口腔凝胶



【产品名称】

通用名称:口腔凝胶

英文名称:Oral Gel

【规格装量】

10ml/瓶,使用前为液体,使用后为凝胶。

【产品结构组成】

由二油酸甘油酯,卵磷脂(大豆卵磷脂),乙醇,丙二醇,吐温80,薄荷油组成。

备注:本产品不含上述成分以外的其它成分,如苯达明。

【产品性能】

口腔凝胶为基于脂质类的不含防腐剂的液体,装在多剂量容器中。当它接触到口腔粘膜时,液体粘附并在5分钟内形成一层保护膜,经由保护膜的机械屏障作用而缓解疼痛。

【适用范围】

适用于放疗或化疗引起的口腔溃疡的覆盖。

【使用说明】

使用指南:去除计量泵上的保护帽,按压泵,首次使用前泵入一张纸巾上直至泵出平稳的液体流即可使用。如果口腔中有大量的粘液存在或明显的口腔干燥,推荐使用者在使用本品前用水漱口。

用法用量:成人(18岁以上):用力按压泵,喷液体流于口腔中,1-3喷/次,分布在口腔内受影响区域(如有必要使用舌头),保持数分钟让液体转变成凝胶并形成保护膜。液体流可直接喷在特别疼痛的区域。口腔凝胶应用于口腔直到咽部。

使用频率:2-3次/日。